

Инструкция по изъятию крови на карту

- Подписать индивидуальную карту от каждого участника, обязательные поля:
 - для образца **от ребенка**: вверху слева от серийного номера указать «Ребенок» ФИО ребенка со слов матери (если нет имени, то фамилию и имя, если неизвестно, обязательно заполнить поля: «ФИО матери», где указать ФИО родившей его женщины, даже если она суррогатная) «ФИО матери», «Дата родов», «Дата взятия крови», «Пол», «Код медицинского учреждения», «ФИО взявшего кровь».
 - для образца **от потенциальной матери**: «ФИО матери», «Дата взятия крови», «Пол», «Код медицинского учреждения», «ФИО взявшего кровь».
 - для образца **от потенциального отца**: в поле «ФИО матери» зачеркнуть «...матери» и левее дописать: «Отца» и записываем в клеточки ниже ФИО отца, «Дата взятия крови», «Пол», «Код медицинского учреждения», «ФИО взявшего кровь».
 - для образца от **донора половых клеток**: в поле «ФИО матери» в поле «ФИО матери» зачеркнуть «...матери» и левее дописать: «Донора» и записываем в клеточки ниже ФИО донора половых клеток, «Дата взятия крови», «Пол», «Код медицинского учреждения», «ФИО взявшего кровь».
- Кровь берется обычным способом, стерильным скарификатором из пальца или пятки, падающей каплей, не касаясь бланка. Важно, чтобы пятно крови на бумаге было образовано пропитыванием от одной капли, а пропитывание бумаги было достаточным (вид пятна одинаков с обеих сторон).
- Полученные пятна крови высушивают в течение 2-3 часов в горизонтальном положении при комнатной температуре (+18 - +25°C), избегая попадания прямых солнечных лучей.
- Размер насквозь пропитанного кровью кружка должен быть в диаметре не менее 12 мм.
- Таких кружков (пятен) должно быть не менее двух.
- Образцы крови, наносимые на фильтрованную бумагу, не должны содержать ЭДТА во избежание искажения результатов анализа.
- После высушивания загнуть часть внешнего листа со значком биологической опасности на поверхность карты.
- Поместить карту в конверт, заклеить его и подписать «Ребенок кровь ФИО».
- Не забудьте заполнить приложенную к карточке ИДС на каждого участника (за ребенка заполняет и подписывает родившая его женщина).



The image shows two forms used for blood collection. The left form is a storage card with instructions and a grid for data entry. The right form is a registration card with a biohazard symbol and a grid for data entry.

Left Form (Storage Card):

- Top: 903, 2027-07, LOT 5 23 1/B5
- Condition: Условие хранения: Хранить при температуре +2 - +25°C и относительной влажности воздуха не более 85% в защищенном от света месте.
- Grid 1: ФИО матери: Иванов Алексей SN 0358038
- Grid 2: ФИО ребенка: Иванов Алексей
- Grid 3: Дата родов: 01.01.2023, Дата взятия крови: 02.01.2023, Пол: Муж
- Grid 4: Длительность (дл./лет): 01, Срок гестации, недель: 01, Вес, грамм: 0000
- Grid 5: Особые клинические состояния: (empty)
- Grid 6: Телефон матери: (empty)
- Grid 7: Адрес проживания ребенка: (empty)
- Grid 8: Адрес прописки: (empty)
- Grid 9: Код медицинского учреждения: 0000000000, ФИО взявшего кровь: Иванов Алексей И.И.

Right Form (Registration Card):

- Top: BIOHAZARD symbol
- Title: КАРТА ДЛЯ ЗАБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. Диаметр использования: карта с 5-ю кружками. Не касаться области нанесения образцов. Не использовать в случае повреждения.
- Condition: и относительной влажности воздуха не более 85% в защищенном от света месте.
- Grid 1: ФИО матери: Иванов Алексей SN 0358038
- Grid 2: ФИО ребенка: Иванов Алексей
- Grid 3: Дата родов: 01.01.2023, Дата взятия крови: 02.01.2023, Пол: Муж
- Grid 4: Длительность (дл./лет): 01, Срок гестации, недель: 01, Вес, грамм: 0000
- Grid 5: Особые клинические состояния: (empty)
- Grid 6: Телефон матери: (empty)
- Grid 7: Адрес проживания ребенка: (empty)
- Grid 8: Адрес прописки: (empty)
- Grid 9: Код медицинского учреждения: 0000000000, ФИО взявшего кровь: Иванов Алексей И.И.