

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ ОБРАЗЦА ДНК

*Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед тем, как производить забор материала.*

1. Не принимайте пищу за 30 минут до сбора образца.
2. Прополощите рот чистой водой. После этого ничего не берите в рот, не целуйтесь.
3. Четко и понятно напишите на стикере упаковки имя и дату рождения лица, сдающего анализ.
4. Переломите пломбу на трубке и снимите крышку, предварительно вымыв руки.
5. Извлеките ватную палочку из трубки, прислоните ее к внутренней поверхности вашей щеки и энергично водите поперек нее в течение 60 секунд. Нажатие кистью должно быть твердым, но не болезненным.
6. Поместите палочку обратно в трубку, положите ее на ровную поверхность. При этом не закрывайте трубку колпачком.
7. Дайте образцу подсохнуть в течение 15 минут. После этого вы можете закрыть трубку крышкой.

